

Procédure d'installation du driver "MAC OSX VCP"

Explication :

Pour pouvoir utiliser nos applications RW, il est indispensable de charger le driver MAC OSX VCP driver.zip en suivant le lien ci dessous et que vous respectiez les différentes étapes illustrées ci dessous


Lien de téléchargement du driver :

[http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/Mac OSX VCP Driver.zip](http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/Mac_OSX_VCP_Driver.zip)


Installation du driver :

Suivre les copies d'écrans ci-dessous


-1- Une fois téléchargé, cliquer sur l'icône "Téléchargements"

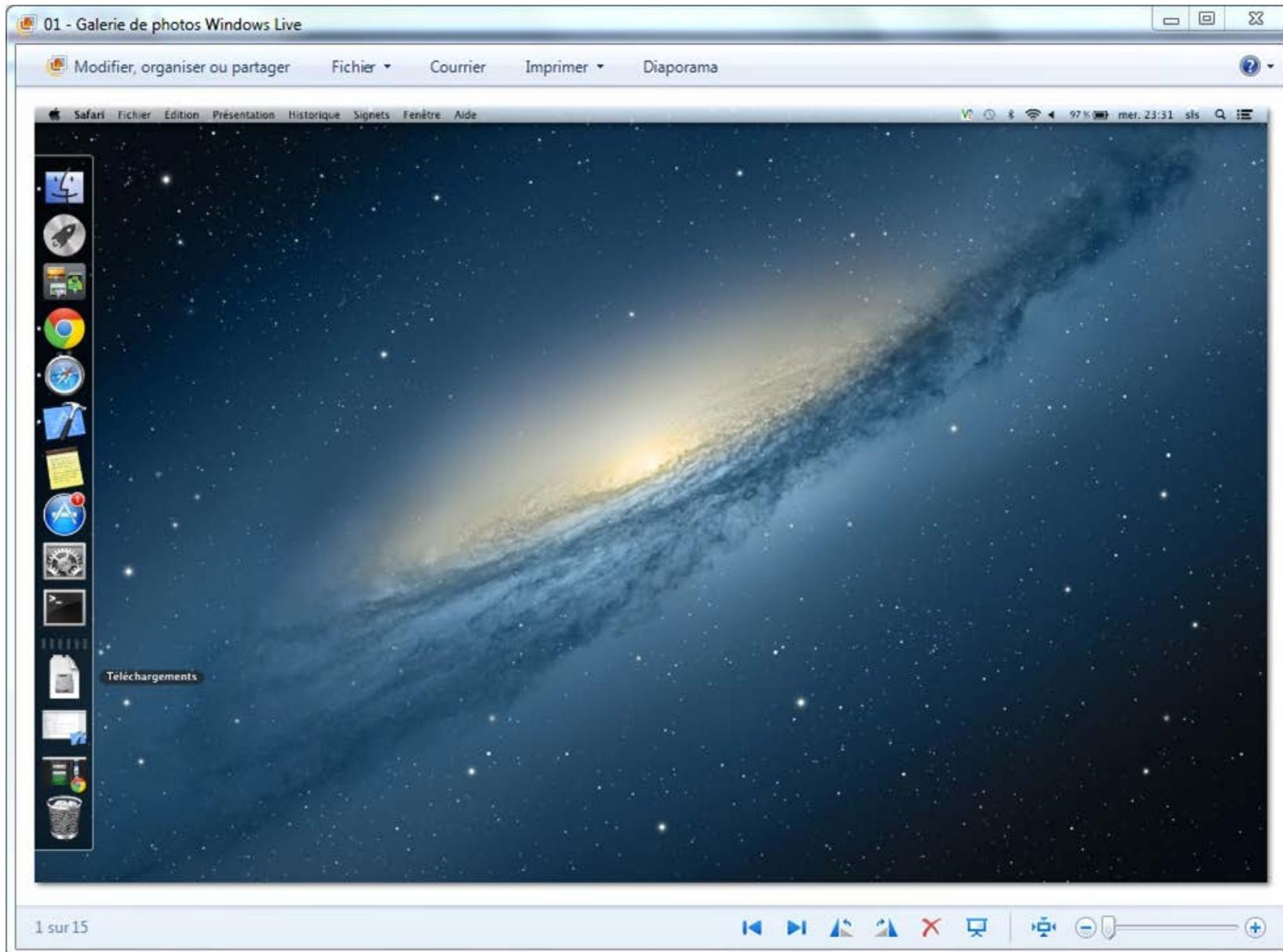


-2- Dans les téléchargements, cliquer sur l'icône : SiLabsUSBDriverDisk.dmg

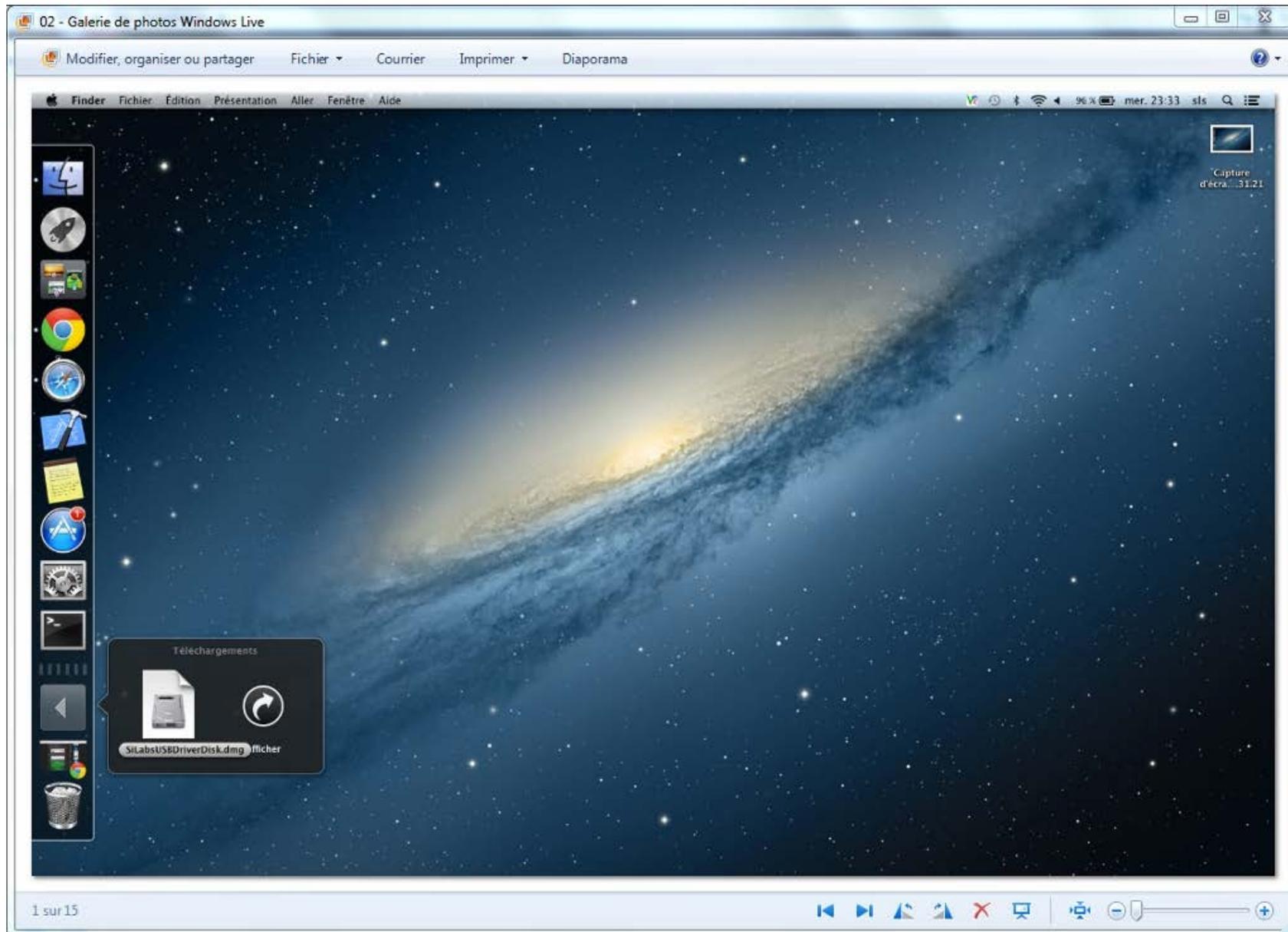


-3- Ceci ajoute un icone sur le bureau : Silicon Labs VCP Driver Install Disk

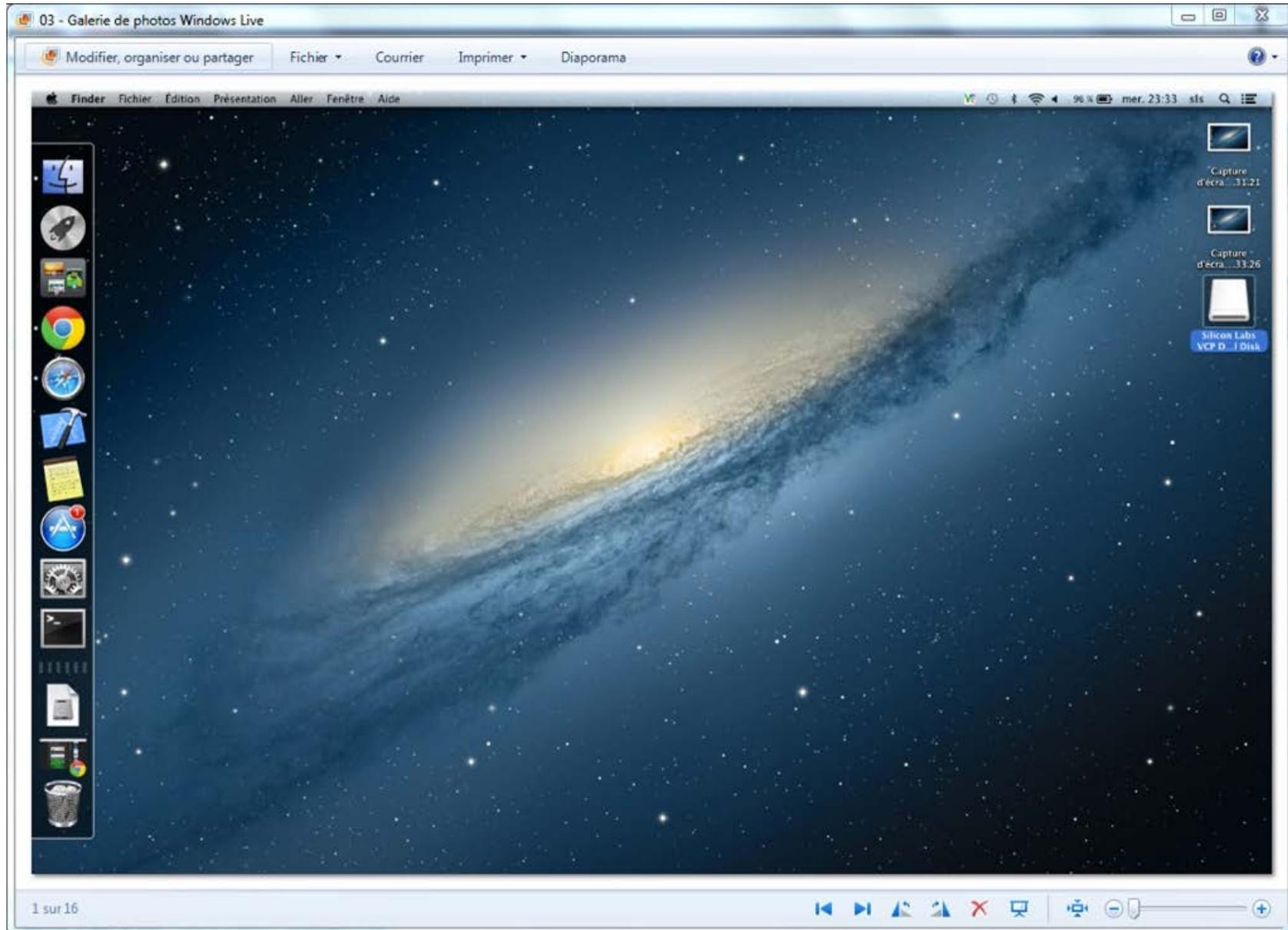

-4- Cliquer sur cet icone, une fenêtre s'ouvre. Ensuite cliquer sur "Silicon Labs VCP Driver Installer"

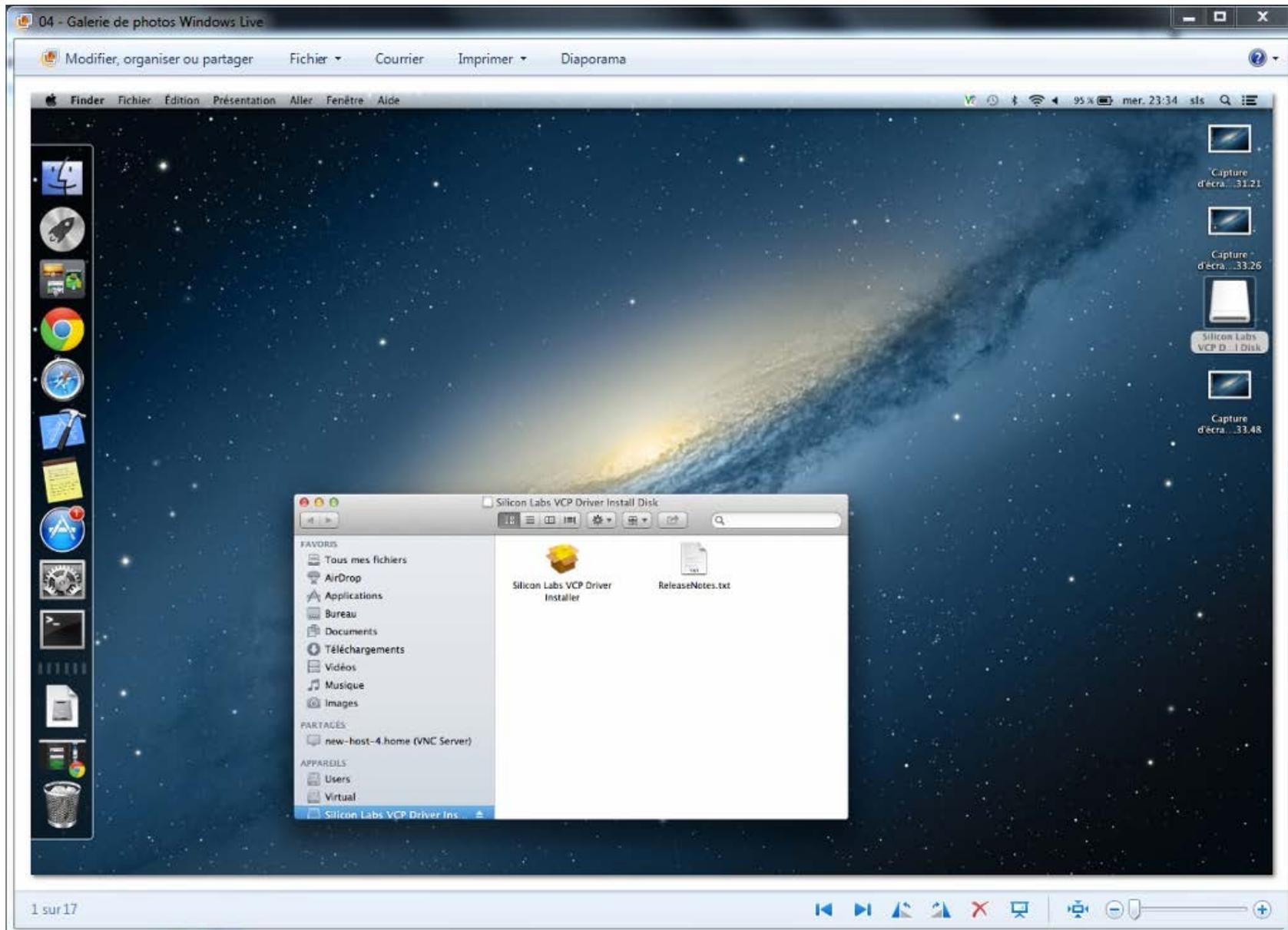


-5- Une erreur apparait car le driver n'est pas signé

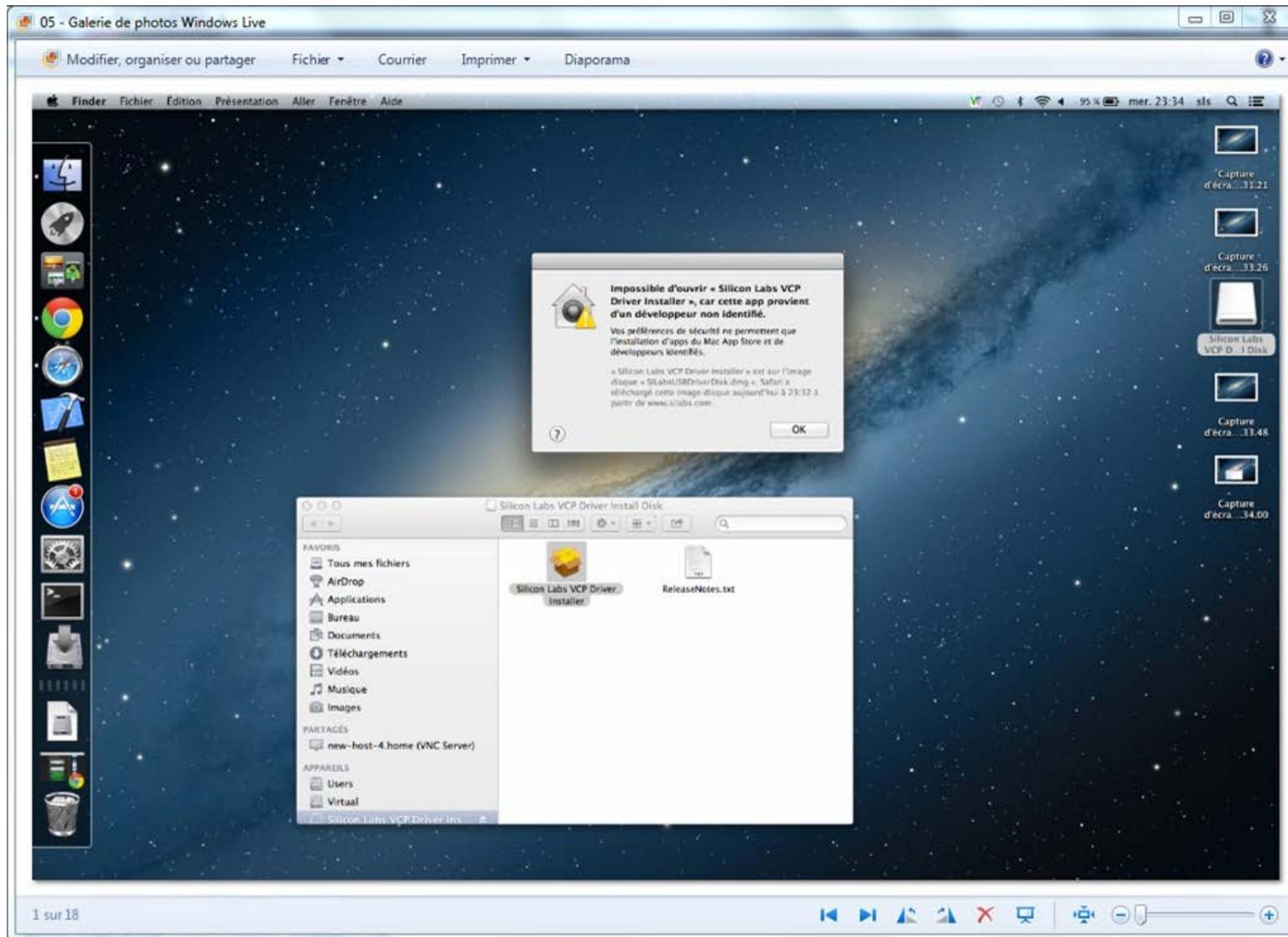


Fermer la fenêtre d'information.

Il faut en fait maintenir la touche CTRL appuyée lorsque vous cliquez sur "Silicon Labs VCP Driver Installer" pour forcer l'installation


-6- Ouvrir

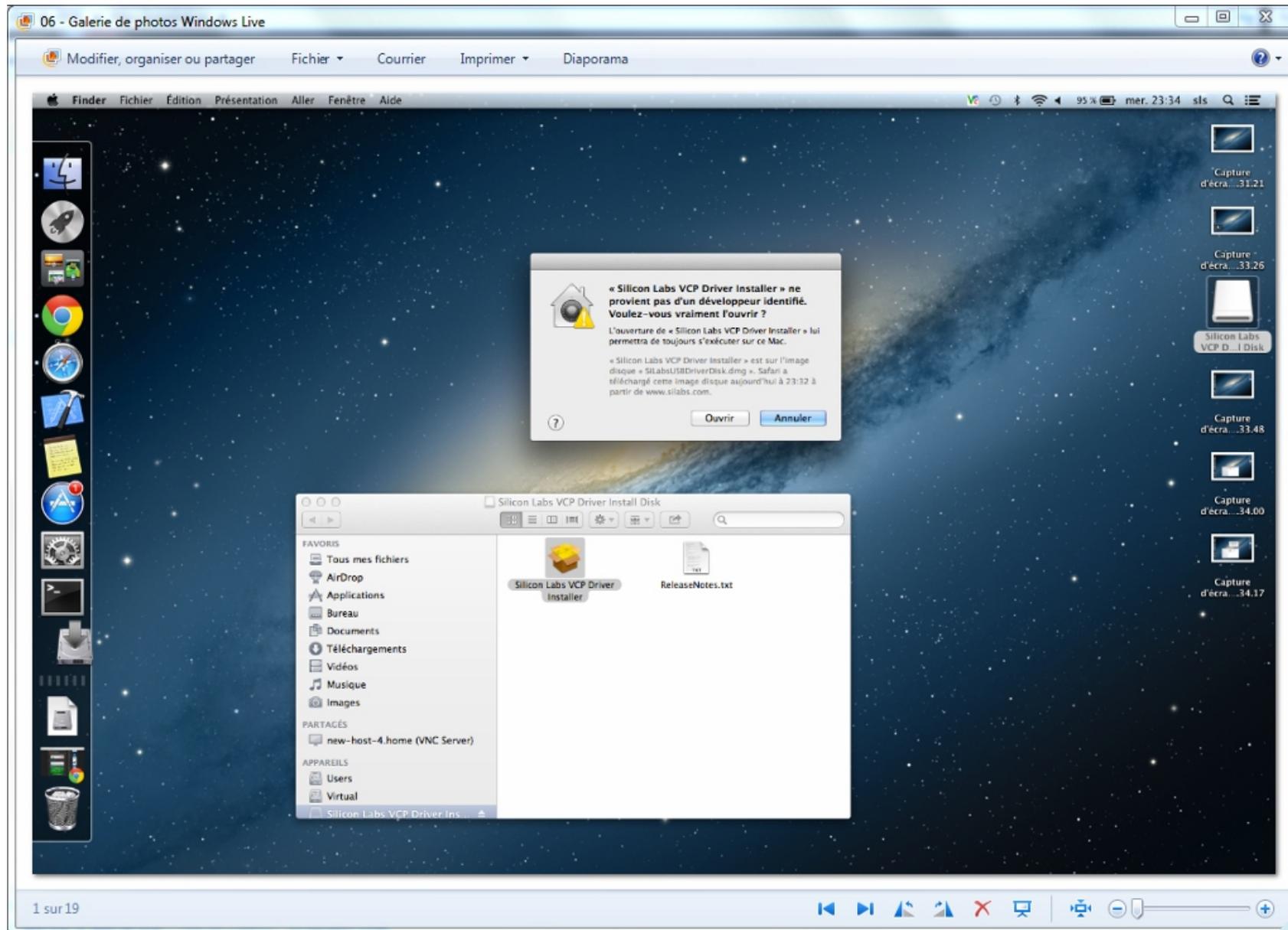


-7- Continuer

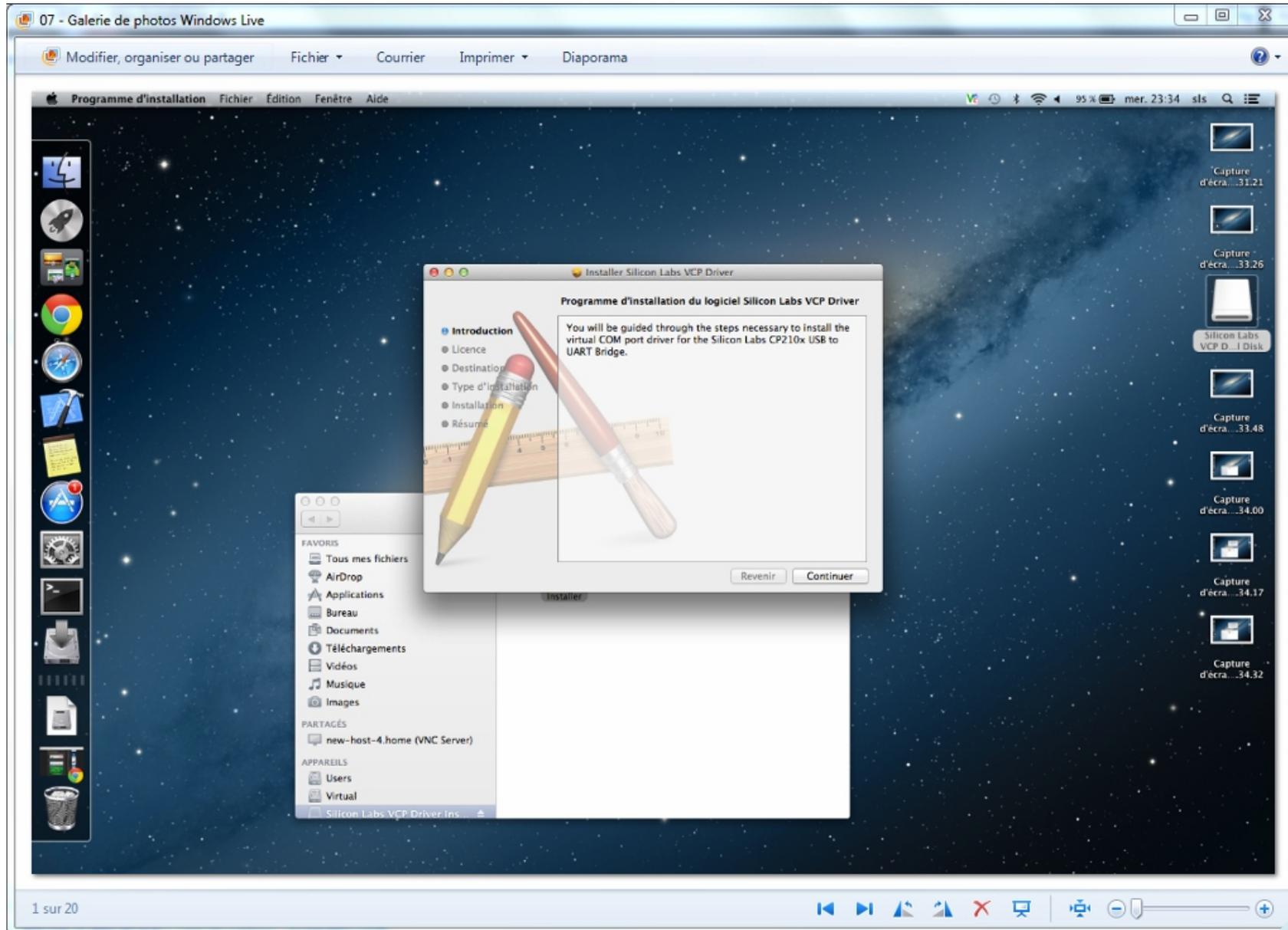


-8- Continuer

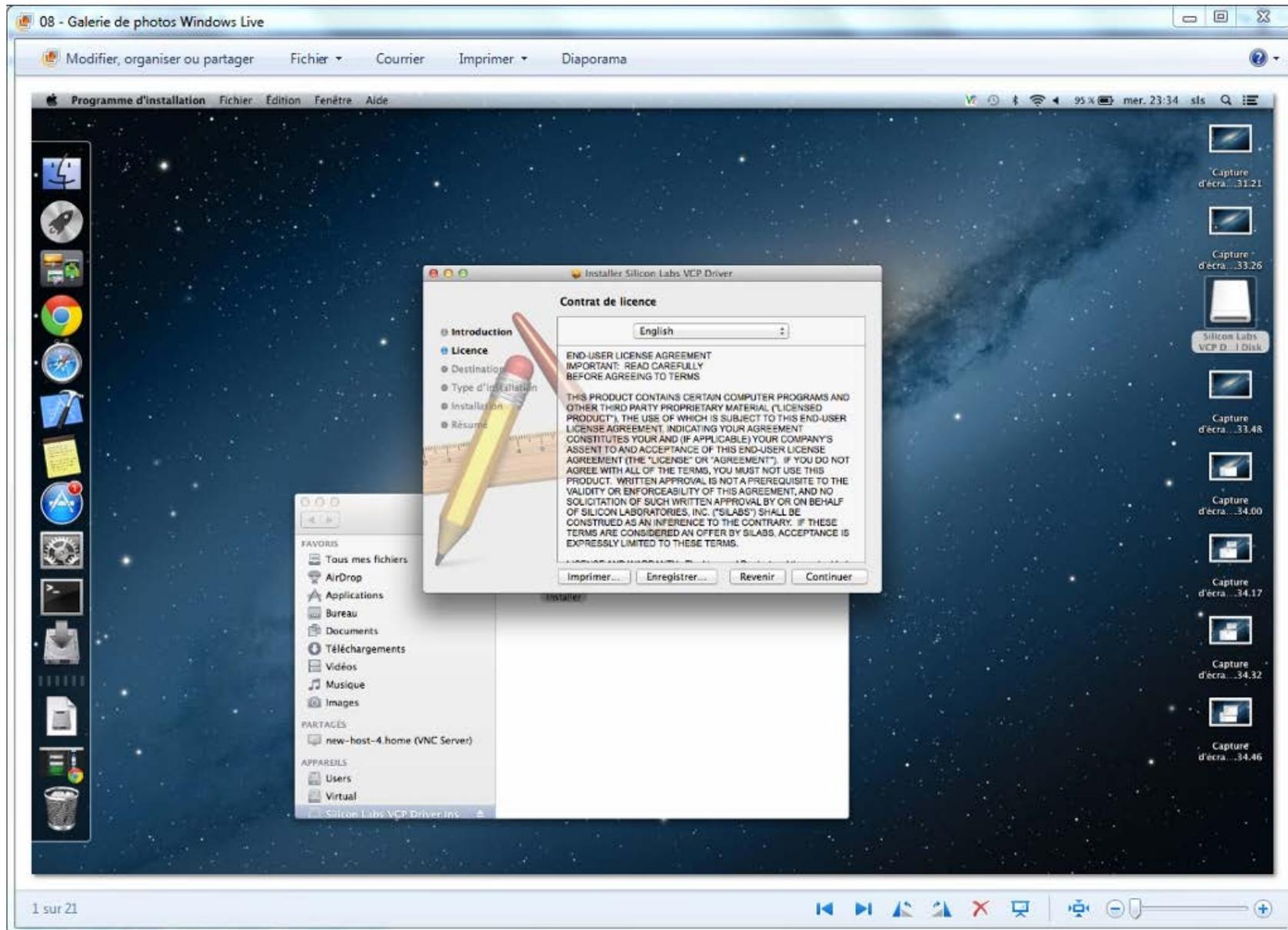


-9- Accepter

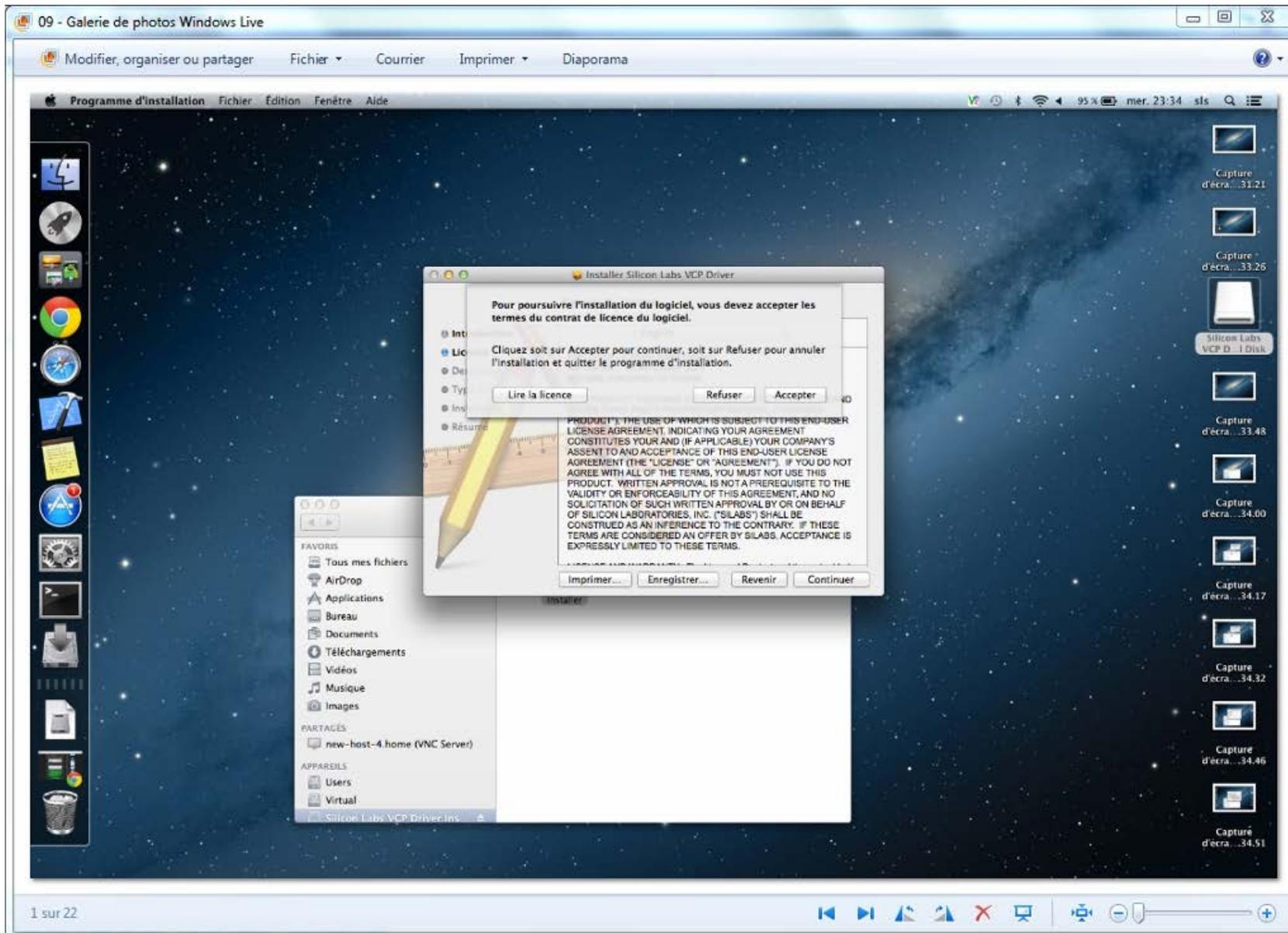

-10- Installer

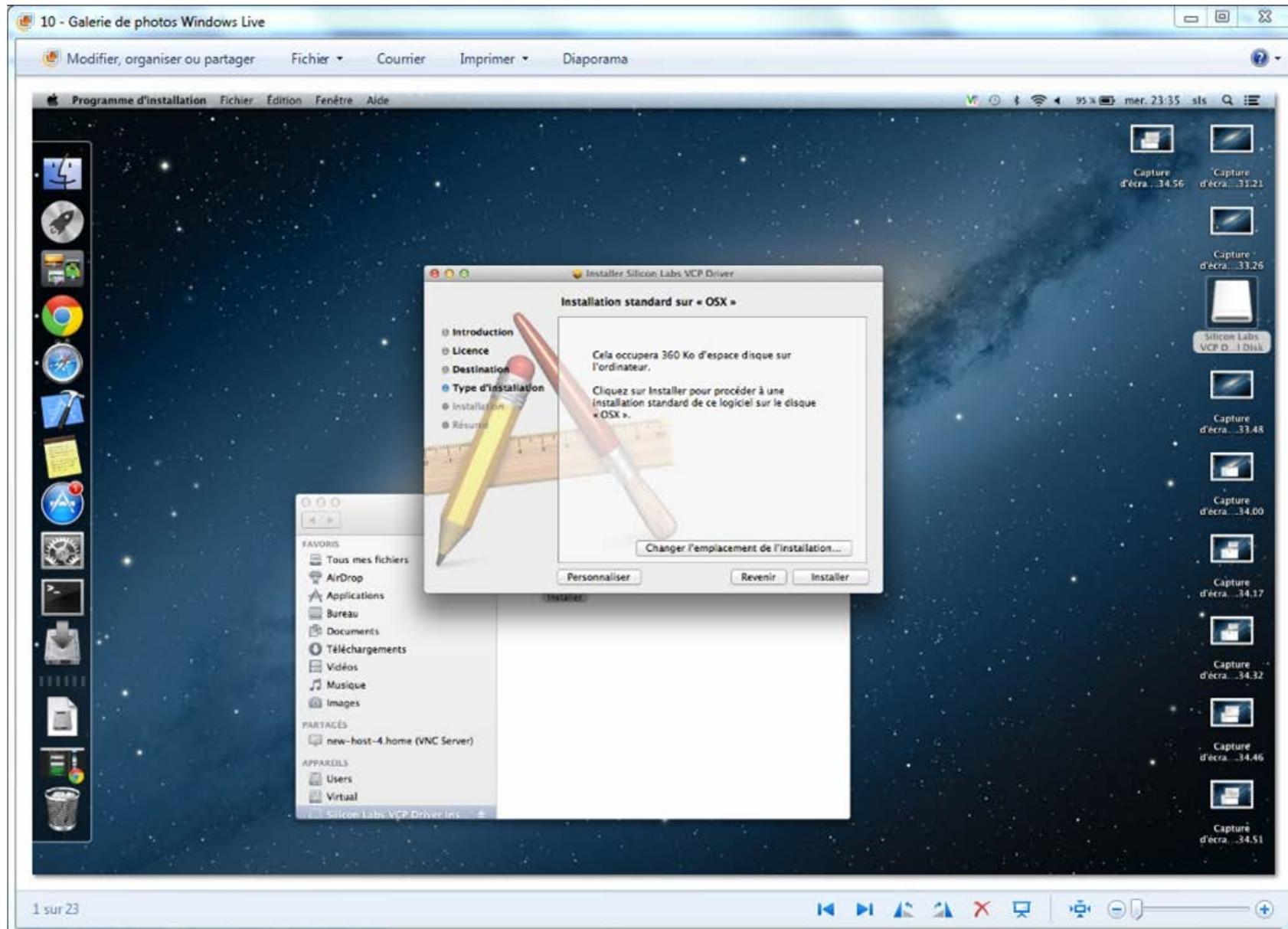

-11- Poursuivre l'installation

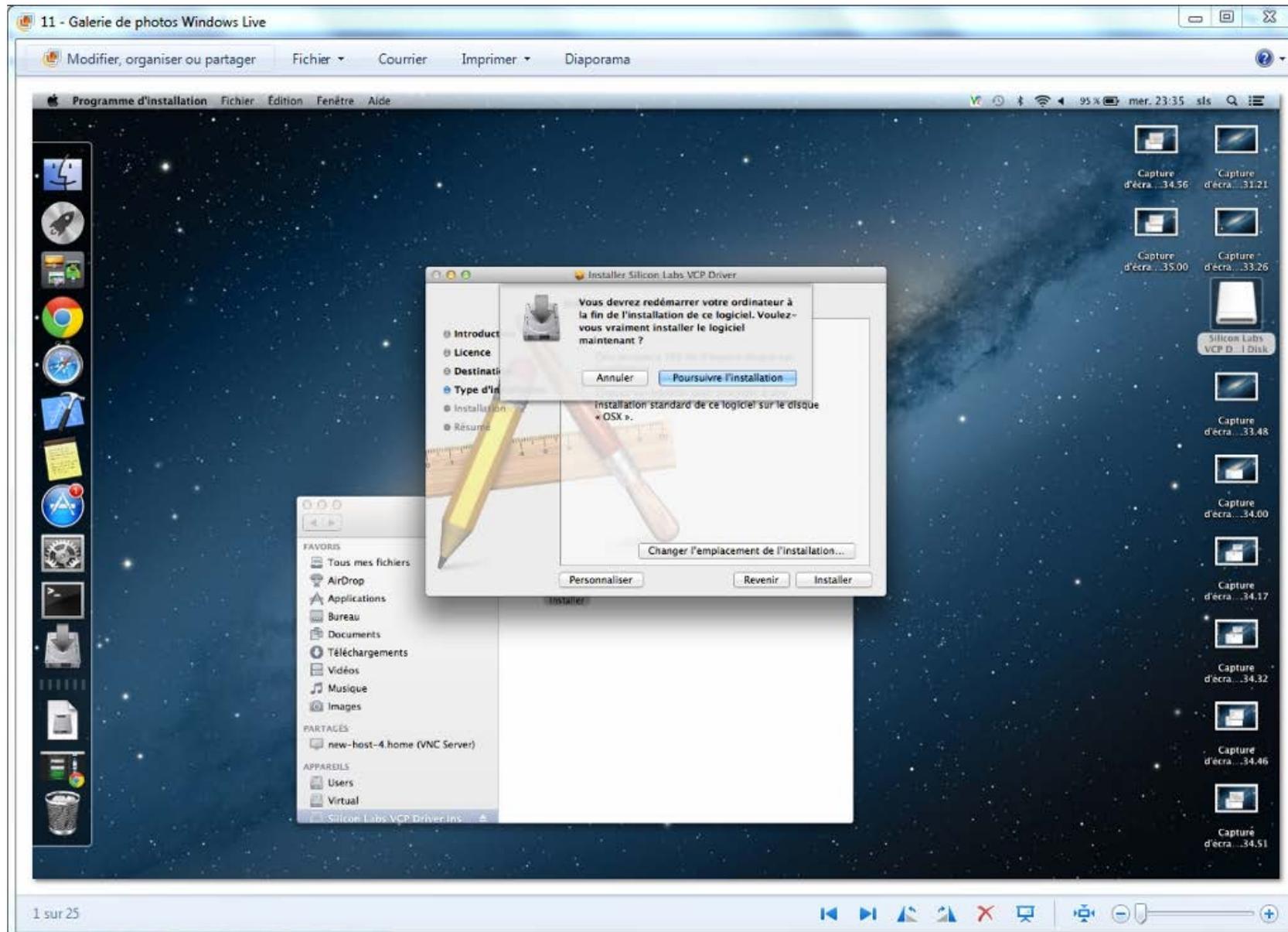

-12- Redémarrer

